

# Esclusa de intercambio de material

**HUPFER**  
we make work flow

Hoja de especificaciones para el artículo 7504604 | DRS 6StE 1150/900/1800



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

## Datos técnicos

<b>Potencia:</b>	50 W
<b>Tensión de conexión:</b>	AC 220-230 V
<b>Intensidad nominal:</b>	0.25 A
<b>Clase de protección:</b>	Klasse 1
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz
<b>Peso:</b>	169.685 kg
<b>Ancho:</b>	1150 mm
<b>Profundidad:</b>	900 mm
<b>Altura:</b>	1800 mm

Esclusa de intercambio de material como armario para el almacenamiento intermedio de material entre la zona limpia y la zona sucia, así como para la distribución de material estéril y la eliminación de material sucio sobre carros de transporte de 6 unidades de esterilización de Hupfer.

Armario completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción robusta, autoportante e higiénica. Cuerpo cerrado por todos sus lados, con dos puertas de doble hoja de doble pared en los lados limpio y sucio. Las puertas con juntas perimetrales se abren hacia fuera; las puertas en el lado de entrada se elevan además mediante bisagras elevadoras especiales. La hoja izquierda de ambas puertas está equipada con un listón de solapamiento. Bloqueo cruzado de las puertas de ambos lados mediante cierre de puerta de accionamiento electromagnético, de modo que es imposible abrir a la vez las puertas de los lados limpio y sucio. Indicadores luminosos rojos en el centro encima de las puertas indican que la puerta del lado contrario está abierta. Pulsadores luminosos verdes permiten desbloquear la puerta que se encuentra debajo, siempre que la puerta del lado contrario esté cerrada. Caja de conexión abatible en el interior para alojar un controlador eléctrico y un pulsador de emergencia para desbloquear las puertas en caso de emergencia. En caso de un corte de suministro eléctrico, todas las puertas se desbloquean automáticamente. La sobrepresión o presión negativa que se genera en el interior del armario al abrirlo y cerrarlo se compensa mediante una abertura de compensación en el techo. Interior con un listón de acoplamiento como tope en el lado limpio, que solo permite introducir y extraer un carro de transporte de 6 unidades de esterilización de Hupfer por el lado sucio. Dos perfiles guía horizontales longitudinales sirven como ayuda para el centrado en la zona del parachoques del carro de transporte. Las dimensiones de la abertura en la pared o del nicho necesarias para el montaje de la esclusa de material pueden consultarse en los requisitos de instalación de Hupfer.

Fecha de consulta: 22.12.2024,  
22:07:16

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*